

Інструкція застосування Одноразова очисна щітка/ Disposable cleaning brush

(Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед застосуванням)

Призначення

Одноразова щітка для очищення є поширеним інструментом для ендоскопа. Її використовують для очищення поверхні та робочого каналу ендоскопа, щоб забезпечити та покращити видимість обладнання для клінічної діагностики та застосування.

Даний інструмент можна використовувати тільки під ендоскопом!

Даний інструмент не призначений для інших цілей!

Не працюйте з пошкодженими інструментами!

Ця інструкція призначена для того, щоб допомогти фахівцю правильно використовувати одноразову цитологічну щітку і таким чином, забезпечити більш високий рівень безпеки для пацієнта.

Одноразова щітка для очищення постачається компанією Alton у нестерильному стані. Перед використанням одноразову щітку для очищення необхідно перевірити на наявність пошкоджень. Використовувати можна лише непошкоджений пристрій! Інструмент призначений для одноразового використання.

Використання

1.1 Введення одноразової щітки для очищення в ендоскоп

Одноразову щітку для очищення слід вводити в робочий канал ендоскопа лише з боку щіткової головки. При цьому потрібно враховувати відповідність діаметрів одноразової щітки для очищення та робочого каналу (див. "Таблиця 1").

1.2 Типи

Компанія Alton (Shanghai) Medical Instruments Co., Ltd. пропонує одноразові щітки для очищення у 6 варіантах: з індексами WAS, WA, WAV, WT, MT та WM


Типи одноразової очисної щітки

№.	Назва	Модель	Розмір
1	Одноразова щітка для очищення (Одностороння)	AF-D1012WAS	Φ1.2*1200mm
		AF-D1022WAS	Φ1.2*2200mm
		AF-D1818WAS	Φ1.8*1800mm
		AF-D2416WAS	Φ2.4*1600mm
		AF-D2422WAS	Φ2.4*2200mm
2	Одноразова щітка для очищення (Подвійна)	AF-D1012WA	Φ1.2*1200mm
		AF-D1022WA	Φ1.2*2200mm
		AF-D1818WA	Φ1.8*1800mm
		AF-D1813WA	Φ2.0*1300mm
		AF-D1810WA	Φ2.0*1000mm
		AF-D1822WA	Φ2.0*2200mm
		AF-D2416WA	Φ2.4*1600mm

		AF-D2422WA	Φ2.4*2200mm
3	Одноразова щітка для чищення (Подвійна)	AF-D1012WAV	Φ1.2*1200mm
		AF-D1022WAV	Φ1.2*2200mm
		AF-D1818WAV	Φ1.8*1800mm
		AF-D2416WAV	Φ2.4*1600mm
		AF-D2422WAV	Φ2.4*2200mm
4	Одноразова щітка для чищення (Потрійна)	AF-D1509WT	Φ2.0*900mm
		AF-D1512WT	Φ2.0*1200mm
		AF-D1516WT	Φ2.0*1600mm
		AF-D1712WT	Φ2.6*1200mm
		AF-D1714WT	Φ3.2*1400mm
		AF-D1716WT	Φ2.6*1650mm
		AF-D1719WT	Φ3.2*1900mm
		AF-D1723WT	Φ3.2*2300mm
		AF-D1740WT2	Φ3.2*4000mm
		AF-D1725WT	Φ2.6*2500mm
		AF-D1740WT1	Φ2.6*4000mm
5	Одноразова щітка для чищення (Багатостороння)	AF-D1309MT	Φ1.2*1000mm
		AF-D1312MT	Φ1.2*1350mm
		AF-D1320MT	Φ1.2*2100mm
6	Одноразова щітка для чищення (потрійні щітки)	AF-D019550WM	Φ0.7*550mm
		AF-D019850WM	Φ0.7*850mm
		AF-D022850WM	Φ0.7*850mm
		AF-D030550WM	Φ1.3*550mm
		AF-D030850WM	Φ1.3*850mm
		AF-D040550WM	Φ1.7*550mm
		AF-D040850WM	Φ1.7*850mm
		AF-D050550WM	Φ1.7*550mm
		AF-D050850WM	Φ1.7*850mm
		AF-D070550WM	Φ2.0*550mm
		AF-D070850WM	Φ2.0*850mm
		AF-D090550WM	Φ2.0*550mm
		AF-D090850WM	Φ2.0*850mm
		AF-D110550WM	Φ2.3*550mm
		AF-D110850WM	Φ2.3*850mm
		AF-D140550WM	Φ2.3*550mm
		AF-D140850WM	Φ2.3*850mm
		AF-D170550WM	Φ2.5*550mm
		AF-D170850WM	Φ2.5*850mm
AF-D200550WM	Φ2.5*550mm		
AF-D200850WM	Φ2.5*850mm		

1. Структура

Одноразова щітка для очищення складається з трьох компонентів, включаючи головку, трубку та захист від вигину. Дивіться рисунок 1.

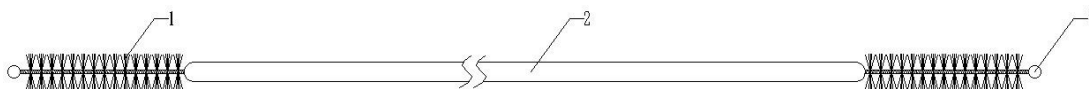

Приимітка:

1. Голівка
2. Трубка
3. Захист від згину

2. Протипоказання

- a. Використання цього пристрою допускається лише професійними операторами.
- b. Не використовуйте цей пристрій для лікування пацієнтів у ситуаціях, які можуть становити загрозу їхньому життю.
- c. Уникайте будь-яких небезпечних ситуацій для пацієнтів під час використання цього пристрою наскільки це можливо.

3. Застереження

- 3.1. Використання цього пристрою допускається лише професійними операторами.
- 3.2. Користувачі повинні знати тип, функцію та діаметр робочого каналу одноразової щітки для очищення. Діаметр робочого каналу має бути більшим за зовнішній діаметр головки щітки.
Наприклад: для моделі одноразової щітки AF-D2416WA зовнішній діаметр трубки становить 2,4 мм, і вона підходить для ендоскопів із робочим каналом діаметром 2,8 мм або більше, з довжиною 1600 мм.

4. Стерилізація/Очищення

- a. Одноразова щітка для очищення не стерилізується компанією Alton перед доставкою.
- b. Стерилізація перед використанням не потрібна.
- c. Призначена тільки для одноразового використання.

5. Термін придатності

Десять років з моменту виготовлення при зберіганні в оригінальному упакованні.

6. Умови зберігання

- a. Зберігати в приміщенні, забезпечуючи чистоту та сухість навколишнього середовища.
- b. Температура зберігання від 0 °C до 40 °C, відносна вологість 30–85%, тиск повітря 50.0–106.0 КПа.
- c. Уникати потрапляння прямих сонячних променів.



Виробник: Alton (Shanghai) Medical Instruments Co., Ltd , No.24 Building, JinShao Rd. 1688, Baoshan District, 200949 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA / Атлон (Шанхай) Медікел Інструментс Ко., Лтд., Но.24 білдинг, ДжінШао Рд. 1688, Баошан Дістрікт, 200949 Шанхай, Китай.

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «АЛТОН УКРАЇНА», Україна, 79041, Львівська область, м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 59, корп. 42. / Alton Ukraine LLC, Ukraine, 79041, Lviv region, Lviv, Kulparkivska street, buld. 59, corps 42.

Дата видачі інструкції до застосування: 20.01.2020



UA.TR.116

Символи:

	Не використовувати у разі пошкодження упаковки		Використовуйте інструкцією до застосування
	Номер по каталогу		Не стерильно (постачається в нестерильному стані)
	Оберігати від сонячного світла		Виробник
	Не використовувати повторно		Номер партії
	Використати до		Дата виготовлення
	Зберігати в сухому місці		Зберігати при температурі від 0 °C до 40 °C